

		Instrucciones de uso de Hyramic CAD/CAM Restauradora	编号	UPQ/JZ-42-0100
版本号	A/5		页码	第1页, 共3页

Fecha de emisión: 2020.03.12

Versión: A/5



Instrucciones de uso

Este producto debe ser manipulado y probado por un técnico dental profesional y debe ser ajustado y colocado por un especialista dental.

Nombre del producto: Hyramic CAD/CAM Restauradora

Instrucciones de uso:

1. Utilizado para restauraciones dentales, como coronas completas, inlays/onlays y carillas.

Composición química:

Polímero de resina, relleno inorgánico, aditivo, agente colorante

Direcciones de uso:

1. Fresar la restauración de Hyramic CAD/CAM Restauradora con máquinas CAD/CAM aplicables;
2. Pula el canal con una rueda de goma gruesa, y acabe con una herramienta media de goma;
3. Prepula con una herramienta fina de goma, pula la pátina con un cepillo de cerda suave y pasta de pulido;
4. Coloración de fosas y fisuras en la superficie de restauración;
5. Limpie la restauración en un limpiador ultrasónico o a vapor. Seque suavemente con aire.

Tonos y Translucidez:

HT(Alta Translucidez), S(Capa única): A-D, BL1-BL4, W 21 tonos;

HT(Alta Translucidez), M(Multicapa): A-D, BL1-BL4, W 21 tonos;

LT(Baja Translucidez), S(Capa única): A-D, BL1-BL4, W 21 tonos;

LT(Baja Translucidez), M(Multicapa): A-D, BL1-BL4, W 21 tonos.

Periodo de conservación: se estima un tiempo de reemplazo de 5 años. No se prevé que el producto se deteriore durante este periodo de tiempo.

Almacenamiento:

1. Mantener el recipiente seco.
2. Almacenar a temperatura ambiente.
3. Mantener alejado de luz intensa o luz solar.
4. El producto debe utilizarse antes de la fecha indicada en la etiqueta.

NOTA: El producto debe ser utilizado exclusivamente por personal cualificado. El fabricante no es responsable de los resultados erróneos ya que no puede controlar si se siguen adecuadamente estas instrucciones o si el producto se utiliza de forma adecuada. Cualquier reclamación por daños debe limitarse exclusivamente al valor comercial de nuestros productos.

Asegúrese de que el dentista ha recibido toda la información necesaria para el uso correcto del producto.

Efectos adversos del dispositivo médico: por ahora no se conocen efectos adversos del dispositivo médico de este producto.

Precauciones: la Ley Federal restringe la venta de este producto por orden de un dentista.

Contraindicaciones:

1. No use el producto si es alérgico a él;
2. Contraindicado para pacientes con hábitos parafuncionales, como bruxismo (hiperfunción) o apretar de dientes.

Instrucciones de seguridad:

1. Evite la colisión con material duro, evite apretar o agitar;
2. Este producto debe ser manipulado únicamente por un especialista dental;
3. Use mascarilla facial adecuada para evitar la inhalación de polvo fino;
4. Use aire comprimido en pequeñas ráfagas para evitar la polución del aire con polvo fino;
5. No hay límite de temperatura durante el proceso de transporte;
6. El producto se suministra no esterilizado y el usuario final no debe esterilizarlo;
7. El producto se suministra al usuario el un alto grado de curación, y este material no debe incendiarse nunca durante el acabado o construcción/adición;
8. De un solo uso;
9. Ya que el producto se hace de dientes falsos, debe limpiarse siguiendo los requisitos médicos.

Eliminación: El material no es nocivo para el medio ambiente.

EC	REP
----	-----

Representante europeo: (consulte la etiqueta)

Nombre: MedNet EC-REP GmbH

Dirección: Borkstrasse 10, 48163 Münster, Alemania.

DIMDI no.: DE/0000048589

Correo electrónico: ecrep@medneteuropa.com

		Instrucciones de uso de Hyramic CAD/CAM Restauradora	编号	UPQ/JZ-42-0100
版本号	A/5		页码	第2页, 共3页

Distribuidor: (consulte le etiqueta)

Fabricante:


Nombre: LiaoningUpceraCo.,Ltd

Dirección: No.122 Xianghuai Road, Economic
Development Zone 117004 Benxi,Liaoning China

Teléfono: +86 24-45565055

Fax: +86 24-45854457

Correo electrónico: ln.upcera@upcera.com.cn

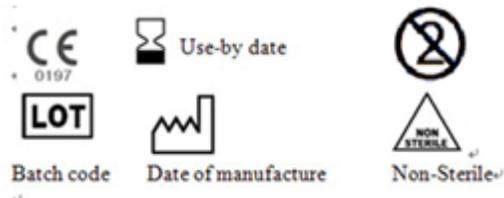

Use-by date	Utilizar por fecha
Batch code	Código de lote
Date of manufacture	Fecha de manufactura

Historial de cambios

Fecha	Versión	Historial de cambios	Preparado por	Revisado por
2015.06.20	A/0	Inicio del nuevo sistema	Feng Shi	Junhui Zhang
2016.08.16	A/1	Cambio de nombre en inglés	Feng Shi	Junhui Zhang
2017.01.11	A/2	Añadir información de fabricación e información e identificación	Zhenzhu Feng	Li Luo
2017.08.10	A/3	Aumento de representación europea, etc.	Feng Shi	Li Luo
2018.08.16	A/4	Adición de etiquetas de advertencia	Jiahang Wu	Li Luo
2020.03.12	A/5	Cambio de información de representante europeo. Adición de "De un solo uso".		